

弊社製品の消毒方法について

2020年6月29日
竹井機器工業株式会社

コロナウイルス関連として、弊社製品の消毒方法について回答いたします。
アルコールは一部プラスチックを劣化させる恐れがあるので本来使用は望ましくないものです。
箇所を限定して使用し、すぐに拭き取るようにしてください。

〈使用可能な消毒液〉

- ・ 消毒用アルコール ※透明部品には使用不可
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム(0.05%濃度)

〈消毒手順〉

- (1) 機器の電源を切ってください。
- (2) 消毒液を柔らかい布に染み込ませ、製品をやさしく拭いてください。
- (3) アルコールの場合は乾拭きで、次亜塩素酸ナトリウムの場合は水拭きできれいに拭き取ってください。

〈注意事項〉

- ・ 短時間で白く曇るものがありますので、アルコールは透明部品に使用しないでください。
- ・ 消毒液がサビや変色などを発生させる恐れがありますので、短時間で拭き取ってください。
- ・ 故障の原因となりますので、機器の内部に消毒液が入らないようにしてください。
- ・ アルコールは火気が無いことを確認してから使用してください。